

Grupo Milligram te saluda. Somos una Empresa Legal que comercializa diferentes Equipos de Laboratorio, Industria e Investigación desde el año 2015, te brindamos productos de excelente calidad y estamos a tu disposición.

Agradecemos corroborar las especificaciones antes de tu compra, resuelve tus dudas ¡con gusto responderemos!



CINTA MÉTRICA ENROLLABLE DE PARED

Cinta métrica enrollable de pared SECA 206 . Se fija en la pared fácilmente con un solo tornillo. El indicador de medida se encuentra en el tope para la cabeza y permite una fácil lectura de la altura. Fabricada en metal.

FIJAR LA CINTA EN LA PARED

1. Fijar la cinta en la pared en el suelo. El campo de visión debe mirar hacia delante.
2. Tire ahora hacia arriba de la cinta de medición hasta que el cero quede cubierto con la tira roja del campo de visión; marque entonces el taladro en la pared, en la parte superior del

AGUJERO DE FIJACIÓN.

3. Empleando el tornillo incluido en el suministro, fije el extremo de la cinta de medición

a la pared.

4. Recoger de nuevo la cinta en la pared

MEDICIÓN CON LA CINTA MÉTRICA

- a. La persona a medir se coloca debajo la cinta métrica
- b. La lengüeta medidora se baja hasta la cabeza.
- c. En el campo de visión aparece la altura del cuerpo.

Manteniendo los pasos mencionados arriba se obtiene una precisión mayor de +/- 5 mm.

ESPECIFICACIONES:

- Rango: medición en cm: 0 – 220 cm
- División: 1 mm
- Dimensiones (AxAxP): 4,9" x 4,9" x 6,8"
- Peso neto: 202 g
- Funciones: Montaje en la pared

Referencia: CP06

NOTA IMPORTANTE: Nuestro inventario cambia rápidamente por esta época. por favor antes de hacer tu compra confirma con nosotros la disponibilidad. no queremos incumplirte.

¡Ten en cuenta! Entregamos Factura Legal.

Para mayor información comunícate con nosotros ¡con gusto responderemos!